

DANSK

1 - PRÆSENTATION

AIRnGO "CLASSIC"- og **AIRnGO "PEARL"**-polerpulvere er udviklet specielt til supragingival profylaktisk behandling. Disse pulvere kan anvendes sammen med alle SATELEOR-luftpoleringsapparater.

AIRnGO "CLASSIC"-pulvere: Naturlige smagsstoffer kan tilvælges: pebermynte, citron, hindbær, cola eller neutral.

AIRnGO "PEARL"-pulver: Neutral pakning af **AIRnGO** -pulvere:

- Dosisposer med 20 g, kun til engangsbrug – Æsker med 50 poser.
- 250 g i multidosisflaske med tud.

2 – INDIKATIONER

- Fjernelse af tandplak, (ortodontisk behandling eller før blegning), fjernelse af misfarvninger. Fjernelse af midlertidige cementrester.
- Polering af tænder efter tandrensning.
- Interproximal rensning, rensning af revner og riller.
- Rensning af bånd og bøjler i munden.
- Rensning og forberedelse af tandoverfladen før ætsning.

3 - EGENSKABER

AIRnGO -pulvernes slibende egenskaber skader hverken emalje eller tandkød.

AIRnGO "CLASSIC": Da behandlingen er smertefri og ikke giver overdreven blødning, er pulverne velegnede til supragingivale vedligeholdelsesbehandlinger. Fås med forskellige smagsstoffer, som giver en frisk fornemmelse i munden.

AIRnGO "PEARL": Indeholder ikke natriumbikarbonat. Pulveret består af ensartede mikrokugler. Gør det muligt at foretage en særdeles aktiv polering, som er utroligt effektiv og smertefri for patienten. Velegnet til patienter på natriumfattig diæt.

4 – SAMMENSÆTNING

AIRnGO "CLASSIC"-pulvere: natriumbikarbonat, silicium, natriumsakkarinat, bindemidler, naturlige essentielle olier eller smagsstoffer.

AIRnGO "PEARL"-pulver: calciumkarbonat.

5 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi anbefaler, at man forhører sig om patientens generelle helbredstilstand, før man anvender pulveret.

- Overhold de betingelser for anvendelse, som luftpoleringsapparatets producent anbefaler.
- Patienten og tandlægen bør anvende passende beskyttelse (beskyttelsesbriller, masker). • Strålen må ikke rettes direkte mod tandkødet.
- Patienten skal skylle munden med en antiseptisk opløsning før og efter behandlingen.
- Smør VaselineR på læberne, før der poleres.
- Brug en stor sugekanyle, og hold den i nærheden af det område, der skal behandles (for at reducere kontaminering med luftbårne bakterier).
- Hvis produktet ved et uheld kommer i kontakt med hud eller øjne, skal der skylles grundigt med vand.
- Må ikke sluges.

6 – MULIGE BIVIRKNINGER

- Kendt allergi over for en af komponenterne.
- Patienter, som lider af endocarditis.
- Patienter med en immundefekt. • Patienter, der behandles med antibiotika, gennemgår kemoterapi, får strålebehandling osv.
- Patienter på natriumfattig diæt.
- Diabetes- eller astmapatienter eller patienter med åndedrætsproblemer.
- Patienter med hæmofili.
- Gravide eller ammende kvinder.

7 – BRUGSANVISNING

Følg den brugsanvisning, der følger med dit luftpoleringsapparat. Generelt:

- Hold en "stråleoverflade"-vinkel på mellem 45° og 60°.
- Hold en "sprøjteoverflade"-afstand på ca. 6 mm.
- Foretag små, cirkulære bevægelser på tanden.
- Ret strålen mod okklusalfladen.

8 - OPBEVARING

Udløbsdatoen på yderpakningen må ikke overskrides. Luk flasken tæt til efter brug (indholdet skal bruges hurtigt efter åbning). Kassér dosisperne til engangsbrug efter brug. Opbevares ved stuetemperatur (< 25 °C) og må ikke udsættes for fugt eller lys.

9 – BORTSKAFFELSE AF UBRUGT PULVER

Må ikke kastes i afløb eller vandløb.

Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Advarsel: Ifølge amerikansk lovgivning må dette udstyr kun anvendes af kvalificerede personer.